

TREMPER. MÉLANGER. APPLIQUER!

FLolli

Vernis à 5% de fluorure de sodium

Aussi simple que 1-2-3. Flolli est une option efficace, facile et abordable de l'application de fluorure, parfaite pour tous les patients! Chaque paquet de Flolli comprend un pinceau et une cupule de vernis.

Efficace	Flolli crée une barrière protectrice pour les zones à risque de carie.
	Flolli procure une protection contre la déminéralisation.
	Flolli agit comme un désensibilisateur.
	Flolli demeure sur la dent pendant 6 à 8 heures pour une absorption optimale de fluorure.
	Le fait de mélanger le vernis avant l'application garantit une concentration uniforme de fluorure à chaque application. Une bonne consistance assure une couverture complète.
Classé parmi les meilleurs vernis au fluorure dans le rapport des cliniciens 2009 de Gordon J. Christensen.	
Facile pour vous	Prêt à utiliser : TREMPER le pinceau, MÉLANGER le vernis et APPLIQUER sur les dents. Vous avez simplement à jeter l'emballage.
	La formule non collante est facile à appliquer et laisse un fini doux sur les dents.
	Le vernis est de couleur blanche pour faciliter l'application. Le vernis devient transparent dans les secondes suivant le contact avec la salive.
	Flolli est offert en emballage pratique de dose unique – incluant tout ce dont vous avez besoin dans un paquet.
Facile pour le patient	Il n'est pas nécessaire d'effectuer une nouvelle application avant six mois.
	Aucune décoloration. Pas de dents jaunes embarrassantes comme avec les autres marques.
	Le goût de gomme balloune plaît aux enfants.
	Flolli élimine l'inconfort des plateaux pour gel (porte-fluor) et le gâchis des gels et des mousses.
	Flolli élimine le tracis lié à l'ingestion de fluorure et réduit le réflexe de haut le cœur.
Coût	Le patient peut quitter le bureau immédiatement après l'application de Flolli.
	Flolli offre une très bonne valeur. Les traitements abordables ne coûtent que 1,25 \$ par application.

MODE D'EMPLOI:

- Nettoyer les dents et éliminer l'excédent d'humidité de la région à traiter.
- Saisir le film de protection et le tirer lentement pour mettre à nu la brosse applicatrice et le godet de vernis.



- Retirer la brosse applicatrice, la plonger dans le godet et mélanger.
- Appliquer un mince film de vernis sur la région à traiter.
- Laisser le vernis sécher pendant environ 10 secondes, puis dire au patient de fermer la bouche.
- Jeter l'emballage et l'applicateur après utilisation.
- Le patient peut partir immédiatement après le traitement. Conseiller au patient de manger des aliments mous et de boire des liquides froids seulement, pendant les deux heures qui suivent le traitement, ainsi que de ne pas se brosser les dents pendant 6 heures au minimum.
- Une fois sec, tout excédent de vernis peut prendre une apparence de "taches" et se détacher de la surface de la dent. Ceci n'affectera pas l'efficacité du produit, étant donné qu'une couche entière de vernis demeurera en place sur la dent.

Format	Saveur	
Dose unique de 0,3 ml	Boîte de 120 x 0,3 ml	Gomme balloune

* Fluor total libéré (µg) dans 4 heures:	
3.78 ± 0.27	12.11 ± 0.87
Marque Vedette	Flolli vernis de fluorure

- Absorption optimale de fluorure!
- Facile à utiliser, facile à appliquer!
- Traitement économique!



GERMIPHENE®

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre représentant(e) de district ou Germiphene au 1-800-265-9931. Visitez-nous en ligne à www.Germiphene.com | Demandes par courriel : info@germiphene.com