

TRES CLEAN

Produit	Produit nettoyant pour plateaux et instruments
Description	Un produit nettoyant concentré, non oxydant et biodégradable à utiliser pour les plateaux et/ou les instruments dentaires
Fonction	TRES CLEAN déloge toutes les traces résiduelles d'alginate pour empreinte, d'oxyde de zinc eugénol, de ciment au carboxylate et au phosphate ainsi que les traces de vernis adhésif des porte-empreintes et des instruments.
Emballage	Concentré en contenant de 1 litre
Caractéristiques	Avantages
Rentable	La formule concentrée doit être diluée en une solution de 5 à 10 % (diluez 50 à 100 mL dans 1 litre d'eau). 1 litre peut donner jusqu'à 20 litres de solution.
Non oxydant	Doux pour tous les plastiques et tous les porte-empreintes et instruments en métal inoxydable.
Durable	La solution peut être utilisée pendant 2 à 3 jours.
Facile à utiliser	Après le pré-nettoyage, placez les instruments et les porte-empreintes en position verticale dans la solution. Laissez-les tremper de 2 à 3 heures. L'eau chaude accélère le processus de nettoyage. Les dépôts ramolliront et seront faciles à déloger, soit sous l'eau du robinet ou avec une brosse. Pour obtenir de meilleurs résultats, laissez-les tremper toute la nuit.
Biodégradable	TRES CLEAN est biodégradable et son action nettoyante est très douce.